

Documentation des nouveautés 7.2.31



XPLORE CONSOLEPACS

Evolutions

PACS-410 - Gestion des réaffectations de patient sur les demandes Xplore

Support de la fonctionnalité de réaffectation de dossiers Xplore

PACS-427 - Possibilité de rapprocher manuellement un examen déjà rapproché automatiquement sur Accession Number

Possibilité de rapprocher manuellement un examen déjà rapproché automatiquement sur Accession Number.

Nouvelle icône indiquant un rapprochement partiel (sur Accession Number et non sur Study Instance UID):

Stat	Date	Heure	Study ID	Patient ID	Origine Pa.	Nom et prénom du patient	Date naiss.	Age	Sexe	Médecin	Libellé	Modalité	Source	Prescripteur	Service	Accession No.	Nb séries	Nb Images	Utilisé en Mo	Site	Dose	Rapproché	Historique	Verru	Action	
	15/03/2016	11:47										CT	Centre Parc			A1000259021	5	217	29.60 IHE							
	15/05/2016	15:33										DOC				A1000011881	2	10	0.82 IHE							
	16/12/2014	11:00										CR				A1000015185	2	5	0.32 IHE							
	16/12/2014	11:07										CR				A1000015194	6	14	0.24 IHE							
	16/12/2014	11:08										CR				A1000015185	2	5	0.18 IHE							

Nouvelle sélection pour afficher les rapprochements partiels :

Stat	Date	Heure	Study ID	Patient ID	Origine Pa.	Nom et prénom du patient	Date naiss.	Age	Sexe	Médecin	Libellé	Modalité	Source	Prescripteur	Service	Accession No.	Nb séries	Nb Images	Utilisé en Mo	Site	Dose	Rapproché	Historique	Verru	Action	
												SR				A1000013016	1	1	0.00 IHE							
												CR				A1000014889	4	10	0.17 IHE							

PACS-401 - Possibilité de récupérer les images en WADO à partir des destinataires dicomWeb

Si un destinataire dicomWeb est configuré pour le WADO (équivalent Dicom Move), possibilité de récupérer les images :

Nom du destinataire	Description	URL	STOW-RS	QIDO-RS	WADO-RS	WADO-URI	Format de stockage	Envoyer FTS	Action
XPLORE	PACS Xplore	http://localhost/PACS							

Date	Heure	Patient ID	Nom et prénom du patient	Date de naissance	Sexe	Accession Number	Libellé	Modalité	Institution Name	Nb séries	Nb Images	présent	Action	Progression	Statut
2002/2017	15:23	00016	EDL*EDL*TEST	17/02/1984	O	A1000275291	Scanner Abdomen et Pelvis - IV	SR		4	4			0%	
07/03/2017	10:16	00016	EDL*EDL*TEST	17/02/1984	O	A1000275729	Abdomen sans préparation	SR		11	11			0%	
15/07/2014	11:33	A1000787	EDL*LAURALYNN	09/12/1958	F	A10007953815	StudyDescription	US		2	5			0%	
15/07/2014	11:21	A10013578	EDL*LINDA	07/02/1953	F	A10007953804	StudyDescription	US		2	5			0%	
12/01/2016	11:00	A10009518	EDL*MANON	21/06/1982	F	A10003268239	StudyDescription	US	Clinique du Parc	1	2			0%	
12/01/2016	10:47	53137	EDL*MICHELLE	31/08/1984	F	A10003268196	StudyDescription	US	Clinique du Parc	3	9			0%	
22/10/2021	10:30	A10005953	EDL*TEST	18/04/1988	O	A1000533877	CHEVILLE	CR,PR		16	16			0%	

PACS-396 - Pouvoir lancer des Qido sur les modalités web

Query par QIDO-RS pour les modalités dicomWeb :



PACS-375 - Passage du PACS en librairie Dicom 4.0.8

Upgrade de la librairie Dicom en version 4.0.8

PACS-350 - Gestion des GSPS pour les CR dans Xplore

Gestion des GSPS pour les CR Xplore en plus des images clé


PACS-407 - Gestion des utilisateurs et des droits sans Xplore Admin

Gestion du personnel et des droits directement dans l'application, sans Xplore Admin :




PACS-386 - Gestion des destinataires DicomWeb

Gestion des destinataires dicomWeb :

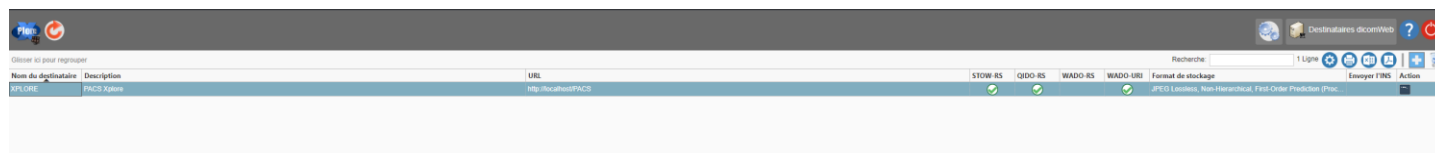

PACS-216 - Routage en webService (Dicom STOW)

Possibilité de router manuellement ou en automatique vers un destinataire de type dicomWeb :

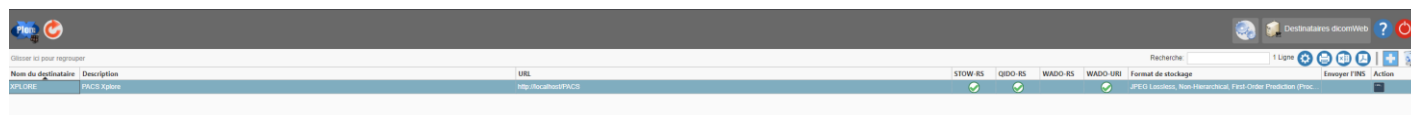

Documentation des nouveautés et correction version 7.2.31

Envoyer vers...

Nom de l'AET
Commentaire

Anonymiser

Nom du destinataire	Description	dicomWeb	Host ou URL
TEST123			1111.1111
WS_SIEMENS_BREAS			proxy:12407
WS_SIEMENS_VIA_1	WS_SIEMENS_VIA_1		proxy:12606
WS_TELEMIS			proxy:12399
WS_VISUS_2016			proxy:12514
XPLORE	Dicom Listener		localhost:104
XPLORE	PACS Xplore		http://localhost/PACS
XPLORE_HIDE			ed3:105
XPLORE_IMG1	PACS Xplore OVH		demo.xplore.fr:205
XPLORE_PACS	PACS Xplore		localhost:106
XPLORE_TLM	PACS Xplore OVH TLM		demo.xplore.fr:206
XPLORENEW			133.99.100.48:10444
XPLOREVIEW			localhost:104

Routeur / Prefetching

Général Horaires

Type
Source
Destinataire
Commentaire

AET émetteur
Niv.
Nb antérieures
Type Exam. ant.
Heure
Anonymiser

Routage simple Routage Xplore Prefetch. Dicom Prefetch. Xplore Prefetch. Evt. Tous

Nom du destinataire	Description	dicomWeb	Host ou URL
<input type="checkbox"/> TEST123			1111.1111
<input type="checkbox"/> WS_SIEMENS_BREAS			proxy:12407
<input type="checkbox"/> WS_SIEMENS_VIA_1	WS_SIEMENS_VIA_1		proxy:12606
<input type="checkbox"/> WS_TELEMIS			proxy:12399
<input type="checkbox"/> WS_VISUS_2016			proxy:12514
<input type="checkbox"/> XPLORE	Dicom Listener		localhost:104
<input checked="" type="checkbox"/> XPLORE	PACS Xplore		http://localhost/PACS
<input type="checkbox"/> XPLORE_HIDE			ed3:105
<input type="checkbox"/> XPLORE_IMG1	PACS Xplore OVH		demo.xplore.fr:205
<input type="checkbox"/> XPLORE_PACS	PACS Xplore		localhost:106
<input type="checkbox"/> XPLORE_TLM	PACS Xplore OVH TLM		demo.xplore.fr:206
<input type="checkbox"/> XPLORENEW			133.99.100.48:10444
<input type="checkbox"/> XPLOREVIEW			localhost:104

Selection courante
Tous

Journal des envois
Aujourd'hui
Du 19/02/2022 au 19/02/2022

Date	Heure	Type	Nom de l'AET	Nom et prénom du patient	Commentaire	Niveau	Date d'exam.	Modality	Libellé	Recherche	1 Ligne	Nb Images	Transmis	Event effectuel	Etat	Status
19/02/2022	18:47:07	Routeur manuel	XPLORE			1	Ready	19/02/2022	CT							

Correctifs

PACS-358 - Chez certains clients, la résolution DNS des clients Qido/Wado est très longue

Désactivation de la résolution DNS lors d'un Qido/Wado

PACS-359 - Erreur lorsque le rapprochement des images se fait sur Accession Number

Correction d'un bug qui empêchait le rapprochement des images sur Accession Number (cas où le rapprochement n'avait pu se faire sur le Study Instance UID)

PACS-362 - Au démarrage, dans certains cas la console PACS indique à tort qu'une autre instance est démarrée

Au démarrage, dans certains cas la console PACS indiquait à tort qu'une autre instance était démarrée

PACS-352 - L'option d'anonymisation RetainUIDs ne fonctionne pas

Correctif sur l'option "Retain UIDs" de l'anonymisation en export

PACS-360 - Routages simples parfois fait en double

Correctif d'un bug sur le routage qui pouvait entraîner plusieurs envois pour le même examen